

AKROMED

## KØLEHANDSKER



Ref. CM-7900

Ref. R070/2

## KØLEFUTTER



Ref. CS-3900

Ref. FP080/2

### BRUGSANVISNING

01. Opbevar produktet i fryseren i mindst to (2) timer.  
Produktet kan efterlades i fryseren på ubestemt tid, indtil det skal bruges.  
Det vil forblive fleksibelt, selv ved -30 ° C.  
**Opbevar altid produktet i en plastikpose under frysning!**
02. **Produkterne må ikke blive våde**, idet gelen vil absorbere vand og svulme op.  
Hvis handskerne bliver fugtige, lægges de på en plan overflade, lad dem lufttørre helt, før du fortsætter brugen.
03. Brug inderhandsker eller indersokker for at sikre god hygiejne og for at undgå direkte kontakt med kølematerialet.
04. Specifikke anbefalinger
  - ° Påfør enheden ca. 15 min. inden behandlingsstart
  - ° Enhed skal udskiftes hvert 35-45 min. under behandlingen
  - ° Hold stadig enheden på ca. 15 min. efter behandling
05. **Rengøringsinstruktioner:** Det aftagelige ydre betræk er et vandtæt elastisk materiale, som rengøres med vand og mild sæbe. Derefter hænges materialet til tørre. Tør det indvendige dække med en fugtig (ikke våd) klud med mild sæbe eller desinfektionsmiddel.  
Lad produktet tørre helt (ca. én time) inden du fortsætter med at bruge det.  
**OBS!** Hvis der ikke er et aftageligt udvendigt betræk: Følg rengøringsinstruktionerne for det indre betræk.

Made in the European Union  
LIEVENS-LANCKMAN BVBA  
B-1850, GRIMBERGEN (Belgium)

